



[Fiche technique]

Aspi venin - Pompe a venin

Réf. 970480

Pompe à vide livrée avec 3 ventouses 10mm, 22mm, 3ème ovale

Succion de 800 millibars, l'équivalent de 10x la succion buccale

ASPIVENIN est le produit idéal pour facilement et rapidement éliminer de manière hygiénique et indolore le venin injecté par un animal ou un insecte venimeux.

Pompe aspirante à venin efficace sur :

Les piqûres de guêpe, abeille, frelon, moustique, araignée, scorpions, aoûtat, vive, rascasse ... ;

Les morsures de serpent ...

Les démangeaisons dues à certaines plantes urticantes

L'ASPIVENIN est simple d'utilisation, la victime peut s'auto-utiliser avec une seule main.

Très pratique à transporter grâce au coffret de rangement en plastique

Livré avec 3 embouts de tailles différentes.

□

Une fois l'embout choisi et correctement positionné, tirer sur la tige blanche.

Complètement pour un adulte, à moitié pour un enfant.

□

Positionnez l'Aspivenin d'une seule main

□

Enfoncez la tige blanche à fond. Laissez agir de 20 secondes à 3 minutes en fonction du type de morsure / piqûre.

□

Soulevez la tige blanche.

Durée de vie indicative 1500 pressions

Pensez à utiliser la [bombe anti frelon longue portée](#) pour vous protéger des piqûres de guêpes.

Informations complémentaires

Les ventouses se lavent à l'eau savonneuse.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Peut être utilisé avec une seule main.
Couleur	Vert Clair, Blanc
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Livré avec	3 embouts de tailles différentes et un coffret plastique de rangement
Instructions d'utilisation	<p>Placez sans forcer l'embout le mieux adapté au type et à l'emplacement de la piqûre ou morsure puis armez la pompe en tirant le piston à fond (à moitié pour un enfant).</p> <p>Placez la pompe ASPIVENIN® muni de son embout sur la blessure en le tenant d'une seule main. Enfoncez le piston bien à fond et en fin de course vous ressentirez une aspiration puissante. Vous laissez alors la pompe ASPIVENIN® agir pendant 20 secondes à 3 minutes (adapter le temps d'aspiration selon les piqûres ou morsures, se reporter à la notice d'utilisation).</p> <p>Cette durée peut-être prolongée ou renouvelée sans inconvénient surtout dans les cas graves. Soulevez ensuite le bouton du piston de la pointe du pouce pour retirer la pompe ASPIVENIN®.</p> <p>Nous vous conseillons de manipuler votre pompe anti-venin avant d'en avoir l'utilité en consultant la notice. Nous vous conseillons également de la conserver à portée de main si vous vous trouvez dans un environnement à risque.</p> <p>Pour une efficacité maximum de la pompe anti-venin ASPIVENIN®, il est recommandé de l'utiliser dans les 3 minutes qui suivent la piqûre / morsure et de respecter les temps d'aspirations indiqués.</p>
Entretien	Les ventouses se lavent à l'eau savonneuse.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	100639

Photos



