



[Fiche technique]

## Attache poignet ou cheville - la paire

Réf. 503971 - 503972 - 503973

### CONTENTION

**vendu par paire. S'installe au poignet ou aux chevilles.**

**3 modèles: enfant, adulte, adulte fort**

**Contention souple pour patient légèrement agité ou désorienté.**

Contention souple pour patient légèrement agité ou désorienté.

*VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS titulaires d'une immatriculation RPPS.*

Ces attaches pour poignet ou cheville, vendues par paire, sont conçues pour assurer une [contention poignet au lit](#) ou une immobilisation douce des chevilles. Disponibles en trois modèles – enfant, adulte et adulte fort – elles garantissent un ajustement parfait à chaque patient. Idéales pour les patients légèrement agités ou désorientés, ces sangles de contention souples assurent un maintien sécurisé sans compromettre le confort.

En préambule, veuillez noter que la vente de ce type de produits est exclusivement destinée à des professionnels de santé possédant une immatriculation RPPS. Nous rappelons que la contention physique, en France, est strictement encadrée par un cadre juridique et réglementaire:

- LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (Source: [Légifrance](#))
- Article L3222-5-1 , Code de la santé publique (Source: [Legifrance](#))

Caractéristiques principales du matériel de contention

- Utilisation : Peut être installée au poignet ou aux chevilles
- Modèles disponibles : Enfant, adulte, adulte fort
- Vendu par paire : Contient deux attaches identiques
- Contention souple : Parfait pour les patients légèrement agités ou désorientés
- Polyvalence : Adaptée pour une utilisation en contention poignet au lit ou aux chevilles

Confort et sécurité des attaches poignet ou cheville

Les attaches de contention souples offrent un maintien sécurisé tout en préservant le confort du patient. Conçues pour limiter les mouvements excessifs sans causer d'inconfort, elles sont idéales pour une contention poignet au lit ou pour l'immobilisation des chevilles, notamment chez les patients présentant une agitation légère ou une désorientation.

Utilisation et praticité de la contention

Faciles à installer, ces attaches de contention pour poignet ou cheville conviennent parfaitement aux

établissements de soins, aux hôpitaux et aux soins à domicile. Leur conception souple et ajustable permet une utilisation prolongée, garantissant la sécurité du patient tout en évitant les blessures dues aux mouvements involontaires.

Avec quoi est livré le matériel de contention physique ?

- 1 paire d'attaches poignet ou cheville (2 pièces)
- Guide d'installation pour une mise en place facile

Pourquoi choisir ces attaches de contention ?

- Contention poignet au lit ou cheville, souple et sécurisée
- Adaptable : Disponible pour enfant, adulte et adulte fort
- Vendu par paire pour une utilisation complète
- Idéale pour les patients légèrement agités ou désorientés
- Facile à installer et confortable pour un usage prolongé

Vous cherchez un [attache poignet](#) ? Trouvez-le facilement sur [smsp.fr](http://smsp.fr).

## Informations complémentaires

---

Produit inflammable.

## Caractéristiques techniques

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                 | Réutilisable   |
| <b>Stérile</b>                     | Non Stérile  |
| <b>Conforme 10g</b>                | Non  |
| <b>Matière</b>                     | Tissu polyester, mousse de polyuréthane, bouclette polyester.<br>Biais 35 % coton - 65 % polyester.<br>Ruban auto-agrippant constitué de 100% polyamide.<br>Sangle en polypropylène.<br>Clips et passant en acétal.<br>Fil nylon-polyester.<br>Absence de latex, phtalates, produit d'origine animale ou biologique.   |
| <b>Instructions d'utilisation</b>  | Placer le membre dans l'attelle et fermer à l'aide du ruban auto-agrippant.<br>Fermer le clip autour du membre et ajuster grâce à la sangle.<br>Fixer la sangle sur le montant du lit à l'aide du deuxième clip et du passant.<br>Ajuster la longueur en fonction du besoin souhaité.<br>Vérifier la tenue de l'immobilisation et assurez-vous du confort pour le patient. |
| <b>Entretien</b>                   | A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière.<br>Lavable à la main (max 30°) avec un savon doux.<br>Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.<br>Ne pas mettre au sèche-linge, ne pas javelliser et ne pas utiliser de détergents.  |
| <b>Classification</b>              | Dispositif médical de Classe 1   |
| <b>Partie du corps</b>             |  |
| <b>Étanche</b>                     | Non  |
| <b>Accessoires et Consommables</b> | Réf. 503976 - Clé magnétique contention aimant néodyme gamme Salvafix coloris bleu<br>Réf. 503977 - Fermeture magnétique gamme Salvafix  |

## Références

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Réf. 503971</b> | Paire attaches membres adulte<br>Couleur : Bleu<br>Taille âge : Adulte           |
| <b>Réf. 503972</b> | Paire attaches membres adulte fort<br>Couleur : Vert<br>Taille âge : Adulte fort |
| <b>Réf. 503973</b> | Paire attaches membres enfant<br>Couleur : Marron<br>Taille âge : Enfant         |

## Photos



Attache poignet ou cheville - la paire



Attache poignet ou cheville la paire 3 modèles: enfant, adulte, adulte fort