



[Fiche technique]

Bandelettes urinaires 8 paramètres - Boite de 100

Réf. 122000

Bandelettes urinaires 8 paramètres - Boite de 100

- Bandelettes urinaires pour dépister des infections et surveiller des pathologies de manière sûre (Infections urinaires, HTA, diabète, fièvre inexpiquée, suivi d'une grossesse)
- Grande simplicité d'utilisation :
 - Examen rapide et lecture immédiate du résultat pour détecter ou suivre l'évolution de nombreuses pathologies.
 - Convient en cas d'infections urinaires, diabète, surveillance des affections rénales, fièvre dont la cause n'est pas encore connue, suivi d'une grossesse.
- Par flacon de 100 bandelettes urinaires Siemens Multistix 8 SG.

Comment lire les résultats d'une bandelette urinaire Siemens ? (siemens multistix 8 sg interprétation)

Il vous suffit de comparer la bandelette avec la gamme colorimétrique indiquée sur l'emballage ou à l'aide d'un instrument spécifique pour les laboratoires d'analyse médicale. Temps d'attente estimé 1 minute

Comparatif avec les méthodes traditionnelles d'uroculture:

"Dans 93 % des cas, le résultat négatif de dépistage des nitrites et leucocytes provenant d'une bandelette Multistix 10 SG a été confirmé par uroculture."

"Saviez-vous que..."

- Seulement 10 à 15 % des urocultures affichent un résultat positif.
- Le coût des urocultures est significativement plus élevé que celui des analyses réalisées à l'aide de bandelettes urinaires.²
- La combinaison des résultats des nitrites et des leucocytes est un meilleur indicateur de la présence ou de l'absence d'une infection des voies urinaires qu'aucun des paramètres d'analyse effectuée individuellement."

Issu du site fabricant Siemens: <https://www.siemens-healthineers.com/fr/urinalysis/bandelettes-reactives-uristest/multistix>

Comparatif avec les laboratoires Roche:

Table 2: Unstressed strips—replicate agreement (exact).

Test	Vendor	Percent Exact Agreement
Bilirubin	Diagnostic Test Group	96.1%
	Roche	84.8%
	Siemens	96.6%
Occult Blood	Diagnostic Test Group	94.1%
	Roche	94.4%
	Siemens	89.7%
Glucose	Diagnostic Test Group	96.6%
	Roche	97.0%
	Siemens	97.5%
Ketone	Diagnostic Test Group	96.6%
	Roche	93.9%
	Siemens	95.1%
Leukocytes	Diagnostic Test Group	87.3%
	Roche	84.3%
	Siemens	88.7%
Nitrates	Diagnostic Test Group	98.0%
	Roche	96.5%
	Siemens	99.0%
pH	Diagnostic Test Group	77.6%
	Roche	91.4%
	Siemens	86.2%
Protein	Diagnostic Test Group	92.2%
	Roche	87.9%
	Siemens	95.1%
Specific Gravity	Diagnostic Test Group	80.0%
	Roche	74.7%
	Siemens	78.3%
Urobilinogen	Diagnostic Test Group	92.7%
	Roche	86.4%
	Siemens	96.6%

Table 3: Unstressed strips—replicate agreement (± 1 group).

Test	Vendor	Percent Within 1 Group Agreement
Bilirubin	Diagnostic Test Group	99.51%
	Roche	100.0%
	Siemens	100.0%
Occult Blood	Diagnostic Test Group	99.5%
	Roche	99.5%
	Siemens	100.0%
Glucose	Diagnostic Test Group	99.0%
	Roche	99.5%
	Siemens	100.0%
Ketone	Diagnostic Test Group	100.0%
	Roche	99.5%
	Siemens	100.0%
Leukocytes	Diagnostic Test Group	99.5%
	Roche	91.4%
	Siemens	98.0%
pH	Diagnostic Test Group	97.6%
	Roche	99.5%
	Siemens	99.5%
Protein	Diagnostic Test Group	100.0%
	Roche	98.0%
	Siemens	100.0%
Specific Gravity	Diagnostic Test Group	98.0%
	Roche	94.9%
	Siemens	96.6%
Urobilinogen	Diagnostic Test Group	99.0%
	Roche	99.0%
	Siemens	98.5%

Où acheter bandelette urinaire?

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter une bandelette urinaire sur SMSP.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur [SMSP.fr](https://www.smsp.fr) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "bandelette urinaire" ou "Siemens Multistix 8 SG" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
3. Sélectionnez le produit : Une fois la bandelette urinaire trouvée, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.

Informations complémentaires

Indicateur de 8 paramètres :

- Glucose
- Corps cétoniques
- SG (densité)
- Sang
- pH
- Protéines
- Nitrites
- Leucocytes

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Détermination de 8 paramètres : <ul style="list-style-type: none">• Glucose• Corps cétoniques• SG (densité)• Sang• pH• Protéines• Nitrites• Leucocytes
Conforme 10g	Non
Unité de vente	Flacon de 100 bandelettes
Classification	Dispositif medical de diagnostic in vitro
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	27630