



[Fiche technique]

## **Batterie Powerheart AED G3 défibrillateur Cardiac Science**

Réf. 282192



**Capacité de 300 chocs ou 20 heures d'utilisation opérationnelle en continue**

**Durée de vie de la batterie G3 : 5 ans. Lithium souffre LiSO2**

- Batterie compatible avec le [défibrillateur automatique PowerHeart G3](#) et semi-automatique de Cardiac Science.
- Batterie Intellisense pour défibrillateur PowerHeart G3 performante de 7.5 Ah soit 20h de monitoring ou 300 chocs.
- Si un test automatique détecte que la batterie G3 arrive en fin de vie, le DAE G3 Elite émet une alerte sonore lorsqu'il possède encore suffisamment d'énergie pour réaliser une intervention.
- La batterie PowerHeart G3 a une capacité de 9 chocs minimum lorsque la batterie de l'appareil est faible.
- Durée de vie : 5 ans à compter de la date de fabrication.
- Découvrez notre gamme complète [de batteries défibrillateur](#).

Voyant d'état de la batterie pour défibrillateur powerheart G3

Le voyant d'état de la batterie G3 comprend 5 DEL (4 vertes et 1 rouge). Les 4 DEL vertes de droite indiquent la capacité restante de la batterie (similaire à une jauge d'essence). Les DEL vertes s'éteignent de manière progressive, de la droite vers la gauche, au fur et à mesure que la capacité de la batterie diminue.

Lorsque les 4 DEL vertes sont éteintes et que la DEL rouge s'allume, vous devez remplacer la batterie.

Remarque : lorsque la DEL rouge s'allume à l'ouverture du couvercle ou à tout moment pendant une intervention, le défibrillateur émet immédiatement le message "BATTERIE FAIBLE". Vous pouvez cependant administrer au moins 9 chocs de défibrillation après le premier message.

Où acheter batterie G3

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter une batterie G3 sur SMSP.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur [SMSP.fr](#) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "batterie G3" ou "batterie défibrillateur powerheart aed g3" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.

3. Sélectionnez le produit : Une fois la batterie trouvée, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.

## Caractéristiques techniques

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Marque</b>          | ZOLL Medical France     |
| <b>Couleur</b>         | Jaune Vif               |
| <b>Conforme 10g</b>    | Non                     |
| <b>Matière</b>         |                         |
| <b>Unité de vente</b>  | A l'unité               |
| <b>Garantie</b>        | Batterie garantie 4 ans |
| <b>Classification</b>  | Non concerne            |
| <b>Partie du corps</b> |                         |
| <b>Code SH</b>         | 9018199000              |
| <b>Étanche</b>         | Non                     |

## Photos



Batterie Powerheart AED G3  
défibrillateur Cardiac Science



Batterie Powerheart AED G3  
défibrillateur Cardiac Science



Batterie Powerheart AED G3  
défibrillateur Cardiac Science