



[Fiche technique]

Canules de Guedel stérile à l'unité

Réf. 333110-333111-333112-333113-333114-333115-333116

7 tailles, 7 codes couleurs, du bleu 50mm au orange 110mm

Canule de Guedel avec une forme anatomique permettant de maintenir les voies aériennes ouverte, tout en évitant à la langue de s'affaisser. Ce dispositif oropharyngée est destiné à être placé sur des personnes inconscientes (victime dans le coma, arrêt respiratoire...).

Conception de grande qualité, stérile en PVC, ce matériel d'intubation dispose d'une longue durée de péremption de 5 ans.

Appelé également canule de mayo, elle est disponible en 7 tailles différentes (plusieurs longueurs).

Recommandations :

- Cette canule oropharyngée doit être utilisée par des personnes formées et entraînées.
- Il est conseillé de ne pas utiliser la canule 5 ans après sa date de fabrication.
- Une fois posée, veillez à ce que le passage du flux d'air soit bien dégagé. En cas d'échec, repositionnez immédiatement la canule de Guedel.

Avant de mettre en place une canule de Guedel, vérifiez l'état de la personne. Pour cela, vous pouvez utiliser l'échelle de Glasgow. Utiliser uniquement si score de Glasgow <5.

Procédure pour libérer les voies aériennes avec la canule de Guedel

Procédure pour libérer les voies aériennes avec la canule de Guedel

Vérification de l'état de conscience du patient

Assurez-vous que le patient est inconscient avant l'insertion, car une utilisation chez un patient conscient peut entraîner des lésions ou des spasmes.

Positionnement du patient

Placez le patient sur le dos de manière stable et inclinez légèrement la tête vers l'arrière pour dégager les voies respiratoires.

Choix de la taille de la canule

Sélectionnez une canule de taille appropriée en fonction du patient. Chez un nourrisson, choisissez une taille

plus petite, généralement déterminée par la distance entre le coin de la bouche et le lobe de l'oreille. Insertion de la canule Insérez la canule délicatement dans la cavité buccale, en orientant la partie courbée vers le toit du palais. Pour un adulte, un léger mouvement de rotation peut être nécessaire pour éviter les obstacles. Chez les nourrissons, insérez-la doucement en suivant l'orientation naturelle de la bouche.

Vérification et vigilance après insertion

Assurez-vous que la canule maintient correctement la langue en place et permet une bonne circulation de l'air. Surveillez sa position pour garantir qu'elle reste en place et que les voies respiratoires restent dégagées. En cas de mouvement ou de signes de détresse respiratoire, réajustez la canule ou utilisez des techniques supplémentaires comme l'intubation si nécessaire.

Précautions et contre-indications

- Patient conscient
 - La canule de Guedel ne doit pas être utilisée chez un patient conscient, car cela pourrait provoquer une gêne, des vomissements ou un réflexe nauséux.
- Surveillance continue
 - Une surveillance est essentielle pour garantir que la canule reste correctement positionnée et que la respiration du patient est adéquate.
- Risques de blessure
 - Une insertion incorrecte peut endommager les tissus buccaux et pharyngés. Assurez-vous d'utiliser la bonne taille et d'insérer la canule avec précaution.

Où acheter canule de Guedel?

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter une canule de Guedel sur SMSP.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur [SMSP.fr](https://www.smsp.fr) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "canule de guedel" ou "canule de mayo" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
3. Sélectionnez le produit : Une fois la canule de guedel trouvée, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.

Informations complémentaires

Validité : 5 ans.

Caractéristiques techniques

Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	PVC Polyéthylène (sans latex)
Unité de vente	A l'unité
Tailles disponibles	Disponible en 7 tailles (plusieurs longueurs)
Classification	Dispositif médical de Classe 1s
Partie du corps	
Étanche	Non

Références


Réf. 333110	Canule de Guedel - T00 Dimensions : 50 mm Couleur : Bleu
Réf. 333111	Canule de Guedel - T0 Dimensions : 60 mm Couleur : Noir
Réf. 333112	Canule de Guedel - T1 Dimensions : 70 mm Couleur : Blanc
Réf. 333113	Canule de Guedel - T2 Dimensions : 80 mm Couleur : Vert
Réf. 333114	Canule de Guedel - T3 Dimensions : 90 mm Couleur : Jaune
Réf. 333115	Canule de Guedel - T4 Dimensions : 100 mm Couleur : Rouge
Réf. 333116	Canule de Guedel - T5 Dimensions : 110 mm Couleur : Bleu clair

Photos



INTUBATION UU

Dimensions canule de guedel
T000

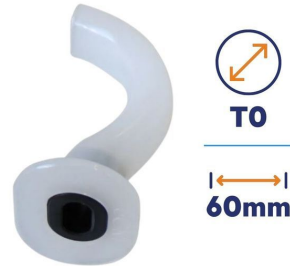

INTUBATION UU

Dimensions canule de guedel T0



INTUBATION UU

Dimensions canule de guedel
T00

USAGE UNIQUE



AVIS ★★★★★

Avis canule de guedel