



[Fiche technique]

Ceinture pelvienne pompier Sam Sling II

Réf. 303100 - 303200 - 303300 - 303101

2 MODÈLES

**En cas de traumatisme ou de fracture du bassin.
Avec boucle autostop évitant un serrage excessif ou insuffisant.
Utilisée par les secouristes du monde entier.**

- Ceinture pelvienne d'urgence Sam Sling utilisée par les secouristes du monde entier en cas de traumatisme ou de fracture du bassin.
- Très efficace pour stabiliser le bassin en toute sécurité en cas de fracture de l'anneau pelvien.
- Permet également de réduire les risques d'hémorragie interne dus à un traumatisme du bassin.
- Monobloc (sans pièces détachables), la Sam Sling est ultra simple d'utilisation et rapide à installer en seulement 3 gestes.
- Ceinture pelvienne secourisme dotée d'une boucle "auto-stop" permettant de bloquer la traction nécessaire autour du bassin du patient (ceci en fonction de sa morphologie) tout en maintenant une compression stable et adaptée.
- Compatible rayon X et RMN.
- A usage unique.
- Retrouvez notre gamme complète d'[attelles](#).
- Découvrez également notre gamme complète de [plans durs](#).

Boucle brevetée AutoStop

□

Boucle Autostop

En fonction de la morphologie de la personne et une fois la bonne traction atteinte, la ceinture va se bloquer

Où positionner la ceinture Sam Sling?



Sam Sling II, placée au niveau des grands trochanters

Vous recherchez une [attelle cheville pied](#) ? Consultez notre sélection sur smsp.fr.

Informations complémentaires

Produit radio-transparent et adapté pour les IRM.

Nettoyage avec un détergeant standard ou une solution antimicrobienne. Ne pas stériliser à la vapeur (autoclave).

Arrière offrant peu d'adhérence, ce qui permet de faciliter les transferts.

Vérifier qu'il n'y a aucun objet dans les poches ou au niveau du bassin de la victime.

Ne pas utiliser la ceinture sur un enfant.

Ne pas placer la ceinture sur une victime non extraite d'un véhicule.

Caractéristiques techniques

Utilisation	Réutilisable
Stérile	Non Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Nylon, polypropylène, polyester, vinyle, uréthane, copolymère acétal, acier inoxydable. Sans latex.
Instructions d'utilisation	Ne pas utiliser la ceinture sur un enfant. Ne pas placer la ceinture sur une victime non extraite d'un véhicule.
Entretien	Nettoyage avec un détergeant standard ou une solution antimicrobienne. Ne pas stériliser à la vapeur (autoclave).
Classification	Dispositif médical de Classe 1
Partie du corps	
Quelle fonctionnalité recherchez vous?	Souple
Quel age a la victime que vous souhaitez transférer?	Adulte
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	A l'unité
Etanche	Non

Références

- Réf. 303300** Ceinture pelvienne Sam Sling - Taille XS
Dimensions : 69-114 cm
Couleur : bleu / orange
- Réf. 303100** Ceinture pelvienne Sam Sling - Taille Standard
Dimensions : 81-127cm
Couleur : bleu / orange
- Réf. 303101** Ceinture pelvienne Sam Sling version militaire - Taille standard
Dimensions : 81-127cm
Couleur : noir / vert militaire
- Réf. 303200** Ceinture pelvienne Sam Sling - Taille XL
Dimensions : 91-137 cm
Couleur : bleu / orange

Photos



ceinture pelvienne réutilisable
disponibles en 3 tailles sur 4
modèles

