



[Fiche technique]

Collier cervical 2 parties Sober - Lot de 6

Réf. 247000

- Facile à mettre en place avec la fixation velcro.**
- Nettoyage facile et radiotransparent.**
- 6 tailles différentes : 3 tailles enfants et 3 tailles adulte.**

BEBE



NOURRISSON



ENFANT



T1



T2



T3



- Collier cervical en deux parties avec orifice trachéal et orifices carotidiens à utiliser lors de suspicion de traumatismes du rachis cervical.
- Facile à mettre en place avec la fixation velcro.
- Confortable pour la victime tout en étant solide (mousse haute densité plastifiée).
- Se nettoie facilement.
- Radiotransparent.

- Lot avec 6 tailles de collier cervical sober:
 - 3 tailles enfant : bébé, petit enfant, enfant
 - 3 tailles adulte : Taille 1 / 2 / 3

Référence	Pour	Couleur	Hauteur avant	Hauteur arrière	Poids
247007	Bébé	Violet	6cm	9cm	160g
247008	Petit enfant	Bleu	8cm	8.5cm	160g
247009	Enfant	Vert	9.5cm	10cm	220g
247003	Adulte	Rouge	12.5cm	13.3cm	360g
247004	Adulte	Rouge	13.5cm	14.3cm	450g
247005	Adulte	Rouge	14.5cm	15cm	530g

Le collier cervical C4 est un dispositif d'immobilisation utilisé par les pompiers et les secouristes en équipe (PSE1/PSE2) pour stabiliser la colonne cervicale en cas de suspicion de traumatisme cervical.

Indications d'utilisation

Le collier cervical C4 est recommandé en cas de :

- Suspicion de traumatisme du rachis cervical (chute, accident de la route, choc violent).
- Douleurs cervicales intenses après un traumatisme.
- Perte de sensation ou faiblesse dans les membres suggérant une atteinte neurologique.
- Altération de la conscience chez une victime d'accident.

Procédure d'application selon le référentiel PSE1/PSE2

1. Protection et évaluation

- Sécuriser la zone d'intervention et évaluer l'état de la victime.
- Maintenir la tête en position neutre (si possible et sans résistance de la victime).

2. Pose du collier cervical C4

- Mesurer la hauteur entre l'épaule et la mâchoire pour régler le collier à la bonne taille.
- Ouvrir le collier et le glisser délicatement sous la nuque.
- Refermer le collier en veillant à un bon ajustement sans compression excessive.

3. Contrôle de l'immobilisation

- Vérifier que la tête est bien maintenue et que la respiration n'est pas gênée.
- Compléter si nécessaire avec un matelas immobilisateur à dépression ou une planche spinal.

4. Transmission aux secours médicalisés

- Informer les secours spécialisés de la mise en place du collier cervical et de l'état du blessé.
- Assurer un transport sécurisé avec immobilisation stricte du rachis.

Le lot des 6 colliers de maintien cervical est livré sans sac.

Si vous êtes intéressés, nous vendons un sac permettant de transporter les 6 minerves de cou. Il s'agit de la référence 247006. Vous la retrouverez d'ailleurs ci-dessous dans la liste des accessoires et suggestions.

- Découvrez notre gamme complète de [collier cervical](#).

A propos de Sober

Créé en 1981 par Dr Berrehail, Sober est un laboratoire français innovant.

Ancré dans le territoire isérois, et notamment la station des 2 Alpes, le laboratoire Sober n'a eu de cesse de créer des solutions pour répondre aux attentes de la médecine de montagne.

Le Laboratoire SOBER a été créé en 1981 par le Docteur Berrehail – médecin de montagne de la station des deux Alpes (Isère) – pour répondre aux attentes de la médecine de montagne. Il met au point progressivement une gamme complète d’attelles spécifiques à chaque articulation palliant à toutes les insuffisances du matériel existant à l’époque.

Vous recherchez [une attelle bras](#) ? Consultez notre sélection sur smsp.fr.

Informations complémentaires

Le produit se désinfecte selon les protocoles habituels.

Caractéristiques techniques

Marque	Sober
Caractéristiques produit	Sans latex.
Couleur	Rouge, Vert, Bleu, Violet
Utilisation	Reutilisable
Conforme 10g	Non
Matière	Styrène éthylène Butylène styrène Polyamide Polypropylène
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	En kit
Accessoires et Consommables	Réf. 247006 - Sac de transport pour collier cervical 2 parties Sober

Photos



lot 6 colliers cervical c4 2 parties pour immobilisation victimes ;
MARque Sober vendu sur SMSP.fr

Collier cervical tailles disponibles
6 choix disponibles