



[Fiche technique]

Electrodes adulte défibrillateur Power Heart Aed G3 - Paire de 2

Réf. 282181

Indispensable au bon fonctionnement du défibrillateur.

Modèle adulte compatible avec le défibrillateur automatique et semi automatique Power Heart Aed G3

Electrodes non-polarisées et interchangeables.

- Electrode défibrillateur compatible avec le [défibrillateur automatique Powerheart G3](#) et semi-automatique Cardiac Science.
- Les électrodes adultes G3 sont prêtes à l'emploi et livrées dans un emballage composé d'une paire d'électrodes autocollantes, un connecteur ainsi qu'un câble.
- Ces électrodes sont à usage unique et doivent être jetées après chaque intervention.
- Les électrodes adultes Powerheart G3 ont une durée de vie de 2 ans. Elles ne doivent pas être utilisées après ce delais.
- Une paire d'électrodes adultes G3 neuve et non déballée doit toujours être branchée à votre défibrillateur.
- Les électrodes doivent être conservées à température ambiante.
- Lorsque le défibrillateur a réalisé le test automatique, un voyant lumineux et un signal sonore indiquent si les électrodes sont débranchées, manquantes ou endommagées.
- Découvrez notre gamme complète d'[électrodes défibrillateur](#).

Comment installer les électrodes adultes powerheart G3 ?

1. Ouvrez le couvercle du défibrillateur automatique ou semi-automatique.
2. Placez les électrodes adultes G3 dans le couvercle du DAE afin que la date d'expiration soit visible à travers la fenêtre transparente.
3. Branchez le connecteur des électrodes au boîtier du défibrillateur en respectant les codes couleurs (rouge/rouge et blanc/blanc). Une fois le connecteur branché au défibrillateur, le voyant des électrodes doit s'éteindre.



4. Placez l'excès de câble dans le support du bas. Une fois les électrodes correctement placées dans le couvercle du défibrillateur, refermez le.
5. Assurez-vous que la date d'expiration soit bien visible à travers la fenêtre transparente du couvercle et

vérifiez que le voyant d'état est vert. Si les électrodes sont mal installées, le voyant d'état devient rouge. Si le voyant d'état reste rouge alors que les électrodes sont correctement installées, contactez l'assistance technique de Cardiac Science.


Informations complémentaires

Durée de vie : 2 ans

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Caractéristiques produit	Durée de vie : 2 ans
Couleur	Noir
Gamme	Powerheart G3 et G3 Plus - DAE et DSA
Conforme 10g	Non
Taille âge	Adulte
Unité de vente	La paire
Garantie	90 jours
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2b
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9018199000

Photos

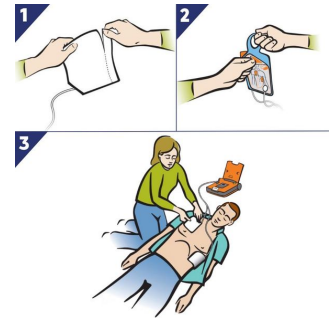

Electrodes adulte défibrillateur
Power Heart Aed G3 - Paire de 2

Electrodes adulte défibrillateur
Power Heart Aed G3 - Paire de 2

Electrodes adulte défibrillateur
Power Heart Aed G3 - Paire de 2