



[Fiche technique]

Électrode défibrillateur enfant Pedi Padz II AED Plus Zoll

Réf. 290284

Convient pour une utilisation sur un enfant de 0 à 8 ans, et de 0 à 25kg.

Compatibles avec les défibrillateurs automatiques et semi-automatique ZOLL AED +.

Chaque produit possède une date de péremption.

- Electrode zoll aed plus : convient pour une utilisation sur un enfant de 0 à 8 ans, et de 0 à 25kg.
- Pratique, une fois les électrodes pedi padz II Zoll connectées, l'appareil reconnaît automatiquement qu'une réanimation pédiatrique est en cours.
- Electrodes pédiatriques pedi padz pour défibrillateur pré-connectables et contenant un gel solide.
- Compatibles avec les [défibrillateurs automatiques ZOLL AED PLUS](#) et semi-automatiques de ZOLL.
- Les électrodes pedi padz II répondent à des critères de taille précis et relèvent les défis que posent les patients de pédiatrie.
- Ces électrodes pour défibrillateur ont une durée de vie d'environ 2 ans.
- Découvrez notre gamme complète [d'électrodes défibrillateur](#).

Mise en place des électrodes pedi padz II

1. Appuyez sur le bouton enfant avant de placer les électrodes pedi padz II sur le patient.
2. Détachez l'emballage des électrodes de l'arrière du défibrillateur et l'ouvrez.
3. Retirez tous les vêtements couvrant le torse du patient. Utilisez les ciseaux situés sur l'emballage des électrodes de défibrillation pour découper les vêtements.
4. Vérifiez que la peau du thorax est sèche et propre. Si le patient a une forte pilosité sur la poitrine, rasez les poils.
5. Retirez le protège-adhésif du capteur violet et de l'électrode verte et placez-les conformément aux illustrations figurant sur les électrodes et leur emballage. Retirez le protège-adhésif de l'électrode bleue et suivez les illustrations pour la placer correctement. Les illustrations affichées à l'écran indiquent également le placement des électrodes.

Une adhésion insuffisante ou la présence de poches d'air sous les électrodes de défibrillation peut entraîner la formation d'un arc, des brûlures cutanées ou la réduction de l'énergie délivrée. Pour limiter le risque de brûlure, appliquez des électrodes de défibrillation non endommagées et provenant d'un emballage qui vient d'être ouvert sur une peau propre et sèche. Ne formez pas de plis ni de rides à la surface du gel lors de l'application des électrodes de défibrillation sur le patient.

Informations complémentaires

Chaque produit possède une date de péremption.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Marque | ZOLL Medical France |
| Caractéristiques produit | Durée de vie de 24 mois. |
| Couleur | Blanc |
| Modèle | Pedi Padz II |
| Gamme | AED ZOLL Plus - DAE et DSA |
| Conforme 10g | Non |
| Taille âge | Enfant |
| Unité de vente | La paire |
| Garantie | 90 jours |
| Classification | Dispositif medical de classe 1 |
| Partie du corps | |
| Code SH | 9018199000 |
| Étanche | Non |


Photos




Électrode défibrillateur enfant
Pedi Padz II AED Plus Zoll



Électrode défibrillateur enfant
Pedi Padz II AED Plus Zoll

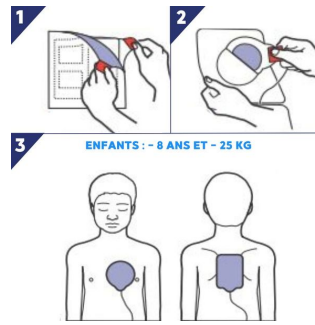


Électrode défibrillateur enfant
Pedi Padz II AED Plus Zoll

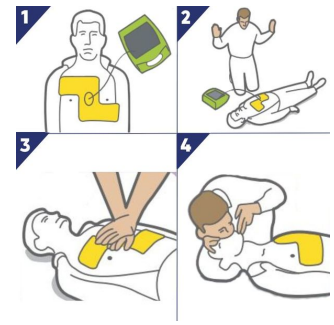

Électrode défibrillateur enfant
Pedi Padz II AED Plus Zoll



Électrode défibrillateur enfant
Pedi Padz II AED Plus Zoll

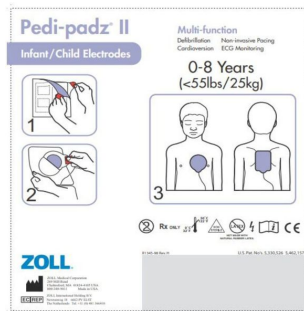

Électrode défibrillateur enfant
Pedi Padz II AED Plus Zoll