



[Fiche technique]

Electrode défibrillateur enfant Powerheart G3

Réf. 282182

Compatibles avec le défibrillateur automatique et semi-automatique G3 Elite.

Adaptées aux technologies d'onde monophasique et biphasique.

Electrodes non-polarisées et interchangeables.

- Electrode défibrillateur compatible uniquement avec le [défibrillateur automatique G3 Elite](#) et semi-automatique de Cardiaque Science.
- Les électrodes pédiatriques powerheart G3 prêtes à l'emploi sont livrées dans un emballage fermé contenant une paire d'électrodes autocollantes, un câble et un connecteur.
- Ces électrodes pour défibrillateur sont à usage unique et doivent donc être jetées après chaque intervention.
- Les électrodes pédiatriques G3 ont une durée de vie de 2 ans. Elles ne doivent pas être utilisées au-delà de ce délai.
- Une paire d'électrode neuve, non déballée, doit toujours être branchée à votre défibrillateur.
- Les températures à respecter lors de l'utilisation des électrodes sont indiquées sur l'emballage.
- Une fois que le défibrillateur a réalisé le test automatique, un voyant lumineux et un signal sonore indiquent si les électrodes sont débranchées, manquantes ou endommagées.
- Conservez les électrodes pédiatriques G3 à température ambiante.
- Découvrez notre large gamme d'[électrodes pour défibrillateur](#).

Installation des électrodes pédiatriques powerheart G3

1. Ouvrez le couvercle du défibrillateur.
2. Placez les électrodes pédiatriques G3 dans le couvercle du DAE afin que la date d'expiration soit visible à travers la fenêtre transparente.
3. Branchez le connecteur des électrodes au boîtier du défibrillateur en respectant les codes couleurs (rouge avec rouge et blanc avec blanc). Une fois le connecteur branché au DAE, le voyant des électrodes doit s'éteindre.



4. Placez l'excès de câble dans le support du bas. Une fois les électrodes correctement placées dans le couvercle du défibrillateur, refermez le.

5. Assurez-vous que la date d'expiration est bien visible à travers la fenêtre transparente du couvercle et vérifiez que le voyant d'état est vert. Si les électrodes sont mal installées, le voyant d'état devient rouge. Si le voyant d'état reste rouge alors que les électrodes sont correctement installées, contactez l'assistance technique de Cardiac Science.

Comment et où stocker l'électrode pédiatrique?

Si votre défibrillateur comporte déjà une électrode adulte, vous n'aurez pas la place nécessaire pour stocker une deuxième paire d'électrode à l'intérieur du boîtier DAE. Il convient donc de le stocker à côté dans l'armoire ou encore, dans la housse fournie avec le défibrillateur.


Informations complémentaires

- Réduit l'énergie de défibrillation délivrée.
- Placement des électrodes pédiatriques recommandé: antérieur/postérieur (ou poitrine/dos - comme indiqué sur les électrodes pédiatriques).
- Electrodes jetables, non-polarisées et interchangeables (chaque électrode peut être placé sur la poitrine du patient ou dans le dos).
- Durée de vie: 24 mois à partir de la date de fabrication.

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Caractéristiques produit	<ul style="list-style-type: none">• Réduit l'énergie de défibrillation délivrée.• Placement des électrodes pédiatriques recommandé: antérieur/postérieur (ou poitrine/dos - comme indiqué sur les électrodes pédiatriques).• Electrodes jetables, non-polarisées et interchangeables (chaque électrode peut être placé sur la poitrine du patient ou dans le dos).• Durée de vie: 24 mois à partir de la date de fabrication.
Couleur	Blanc, Bleu Clair
Gamme	Powerheart G3 et G3 Plus - DAE et DSA
Conforme 10g	Non
Taille âge	Enfant
Unité de vente	La paire
Garantie	90 jours
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2b
Classification	Dispositif medical de classe 2b
Partie du corps	
Code SH	9018199000
Référence fabricant (MPN)	9730-002

Photos

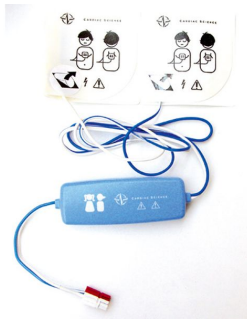

Electrode défibrillateur enfant
Powerheart G3



Electrode défibrillateur enfant
Powerheart G3