



[Fiche technique]

Electrode défibrillateur enfant Powerheart G3

Réf. 282182

Compatibles avec le défibrillateur automatique et semi-automatique G3 Elite.

Adaptées aux technologies d'onde monophasique et biphasique.

Electrodes non-polarisées et interchangeables.

- Electrode défibrillateur compatible uniquement avec le <u>défibrillateur automatique G3 Elite</u> et semiautomatique de Cardiaque Science.
- Les électrodes pédiatriques powerheart G3 prêtes à l'emploi sont livrées dans un emballage fermé contenant une paire d'électrodes autocollantes, un câble et un connecteur.
- Ces électrodes pour défibrillateur sont à usage unique et doivent donc être jetées après chaque intervention.
- Les électrodes pédiatriques G3 ont une durée de vie de 2 ans. Elles ne doivent pas être utilisées au-delà de ce delais.
- Une paire d'électrode neuve, non déballée, doit toujours être branchée à votre défibrillateur.
- Les températures à respecter lors de l'utilisation des électrodes sont indiquées sur l'emballage.
- Une fois que le défibrillateur a réalisé le test automatique, un voyant lumineux et un signal sonore indiquent si les électrodes sont débranchées, manquantes ou endommagées.
- Conservez les électrodes pédiatriques G3 à températre ambiante.
- Découvrez notre large gamme d'<u>électrodes pour défibrillateur</u>.

Installation des électrodes pédiatriques powerheart G3

- 1. Ouvrez le couvercle du défibrillateur.
- 2. Placez les électrodes pédiatriques G3 dans le couvercle du DAE afin que la date d'expiration soit visible à travers la fenêtre transparente.
- 3. Branchez le connecteur des électrodes au boitier du défibrillateur en respectant les codes couleurs (rouge avec rouge et blanc avec blanc). Une fois le connecteur branché au DAE, le voyant des électrodes doit s'éteindre.
- 4. Placez l'excès de câble dans le support du bas. Une fois les électrodes correctement placées dans le couvercle du défibrillateur, refermez le.

Réf. 282182



5. Assurez-vous que la date d'expiration est bien visible à travers la fenêtre transparente du couvercle et vérifiez que le voyant d'état est vert. Si les électrodes sont mal installées, le voyant d'état devient rouge. Si le voyant d'état reste rouge alors que les électrodes sont correctement installées, contactez l'assistance technique de Cardiac Science.

Comment et où stocker l'électrode pédiatrique?

Si votre défibrillateur comporte déjà une électrode adulte, vous n'aurez pas la place nécessaire pour stocker une deuxième paire d'électrode à l'intérieur du boîtier DAE. Il convient donc de le stocker à côté dans l'armoire ou encore, dans la housse fournie avec le défibrillateur.

Informations complémentaires

- Réduit l'énergie de défibrillation délivrée.
- Placement des électrodes pédiatriques recommandé: anterieur/posterieur (ou poitrine/dos comme indiqué sur les électrodes pediatriques).
- Electrodes jetables, non-polarisées et interchangeables (chaque électrode peut être placé sur la poitrine du patient ou dans le dos).
- Durée de vie: 24 mois à partir de la date de fabrication.

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France

• Réduit l'énergie de défibrillation délivrée.

• Placement des électrodes pédiatriques recommandé: anterieur/posterieur (ou poitrine/dos - comme indiqué sur les électrodes pediatriques).

• Electrodes jetables, non-polarisées et interchangeables (chaque électrode peut être placé sur la poitrine du patient ou dans le dos).

• Durée de vie: 24 mois à partir de la date de fabrication.

Couleur Blanc, Bleu Clair

Gamme Powerheart G3 et G3 Plus - DAE et DSA

Conforme 10g Non

Taille âge Enfant

Unité de vente La paire

Garantie 90 jours

Normes et Certification Dispositif médical de classe 2b

Classification Dispositif medical de classe 2b

Partie du corps

 Code SH
 9018199000

 Référence fabricant (MPN)
 9730-002



Photos





Electrode défibrillateur enfant Powerheart G3



Electrode défibrillateur enfant Powerheart G3