



[Fiche technique]

Electrode défibrillateur adulte Stat Padz II aed plus Zoll

Réf. 290285 - 290288

Application rapide, simple et précise.

Electrodes pré-connectables permettant de gagner du temps à l'installation.

Compatibles avec le défibrillateur automatique et semi-automatique Zoll Aed Plus

- Electrode adulte zoll pour adulte pouvant également être utilisé sur un enfant à partir de 8 ans.
- Les Stat Padz II sont compatibles avec les [défibrillateurs automatiques ZOLL AED PLUS](#) et semi-automatiques.
- Emballage très pratique expliquant clairement comment bien positionner les électrodes sur le défibrillateur ZOLL.
- Electrode DAE pré-connectable contenant un gel solide permettant de réduire le temps d'installation des électrodes.
- Un capteur vérifie de manière automatique le bon positionnement des électrodes.
- Electrode stat padz II à usage unique.
- Durée de péremption des électrodes zoll stat padz II : 2 ans
- Découvrez notre gamme complète d'[electrode défibrillateur](#).

Application des électrodes stat padz II

1. Détachez l'emballage des électrodes de l'arrière du défibrillateur et l'ouvrir.
2. Retirez les vêtements recouvrant le torse du patient. Utilisez les ciseaux situés sur l'emballage des électrodes de défibrillation pour découper les vêtements.
3. Vérifiez que la peau du thorax est propre et sèche. Si le patient a une forte pilosité sur la poitrine, coupez les poils.
4. Retirez le protège-adhésif du capteur violet et de l'électrode verte et placez-les en suivant les illustrations figurant sur les électrodes et leur emballage. Retirez le protège-adhésif de l'électrode bleue et suivez les illustrations pour la placer correctement. Les illustrations affichées à l'écran indiquent également le placement des électrodes.

La présence de poches d'air sous les électrodes adultes Zoll ou une adhésion insuffisante peut entraîner la formation d'un arc, des brûlures cutanées ou la réduction de l'énergie délivrée. Pour limiter le risque de brûlure, appliquez des électrodes de défibrillation non endommagées et provenant d'un emballage qui vient d'être ouvert sur une peau propre et sèche. Ne formez pas de plis ni de rides à la surface du gel lors de l'application des électrodes de défibrillation sur le patient.

Informations complémentaires

Durée de vie de 24 mois.

Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Gamme	AED ZOLL Plus - DAE et DSA
Conforme 10g	Non
Taille âge	Adulte
Unité de vente	La paire
Garantie	90 jours
Classification	Dispositif médical de Classe 2b
Etanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 290284 - Électrode défibrillateur enfant Pedi Padz II AED Plus Zoll Réf. 290280 - Electrode défibrillateur adulte CPRD AED Plus Zoll Réf. 290286 - Support mural pour défibrillateur AED PLUS Zoll Réf. 282282 - Disque défibrillation automatisée externe - Aide DAE Réf. 222222 - Kit d'intervention pour DAE défibrillateur Réf. 290293 - Défibrillateur automatique ZOLL AED PLUS® Réf. 290290 - Défibrillateur semi-automatique ZOLL AED PLUS

Références

Réf. 290288 Electrode Stat Padz II adulte pour défibrillateur (la paire)


Photos



Electrode défibrillateur adulte
Stat Padz II aed plus Zoll



Electrode défibrillateur adulte
Stat Padz II aed plus Zoll

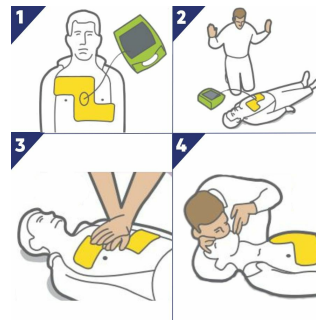

Electrode défibrillateur adulte
Stat Padz II aed plus Zoll