



[Fiche technique]

Ethylotest usage unique certifié NF - Lot de 50

Réf. 999892

- Ballon éthylotest conforme aux exigences de la directive REACH.
- Le réactif passe de la couleur blanche au rouge en cas de présence d'alcool.
- Mesure du taux à 0,5 gr/L de sang (ou 0,25mg/L d'air).
- A utiliser sans modération, pour sauver des vies et vos points de permis.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 14 x 6 x 1 cm
Couleur	Noir, Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	plastique
Unité de vente	Lot de 50
Poids	12 g
Instructions d'utilisation	<p>1 - Sortir le tube, et vérifier la couleur de la pastille sur le ballon (selon la température ambiante la couleur de la pastille peut-être soit blanche soit rouge)</p> <p>2 - Percuter le tube en pressant des 2 côtés,</p> <p>3 - Gonfler en 1 seule fois le ballon (souffle continu et sans interruption),</p> <p>4 - Insérer le tube sur le ballon,</p> <p>5 - Dégonfler entièrement le ballon en 15 secondes environ puis retirer le tube,</p> <p>6 - Prener le tube dans la main et le garder pendant 1 minute si la pastille sur le ballon est blanche ou 3 minutes si la pastille sur le ballon est rouge.</p> <p>7 - Lire le résultat :</p> <p>si pas de coloration alors le test est négatif.</p> <p>si la coloration votre tube devient rouge, alors le test est positif : VOUS NE DEVEZ PAS CONDUIRE.</p>
Classification	Se reporter aux composants
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	999892
Etanche	Non