



[Fiche technique]

## Ethylotest usage unique certifié NF - Lot de 50

Réf. 999892

- Ballon éthylotest conforme aux exigences de la directive REACH.
- Le réactif passe de la couleur blanche au rouge en cas de présence d'alcool.
- Mesure du taux à 0,5 gr/L de sang (ou 0,25mg/L d'air).
- A utiliser sans modération, pour sauver des vies et vos points de permis.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 14 x 6 x 1 cm
<b>Couleur</b>	Noir, Blanc
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	plastique
<b>Unité de vente</b>	Lot de 50
<b>Poids</b>	12 g
<b>Instructions d'utilisation</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 - Sortir le tube, et vérifier la couleur de la pastille sur le ballon (selon la température ambiante la couleur de la pastille peut-être soit blanche soit rouge)</li><li>2 - Percuter le tube en pressant des 2 côtés,</li><li>3 - Gonfler en 1 seule fois le ballon (souffle continu et sans interruption),</li><li>4 - Insérer le tube sur le ballon,</li><li>5 - Dégonfler entièrement le ballon en 15 secondes environ puis retirer le tube,</li><li>6 - Prener le tube dans la main et le garder pendant 1 minute si la pastille sur le ballon est blanche ou 3 minutes si la pastille sur le ballon est rouge.</li><li>7 - Lire le résultat :</li></ol> si pas de coloration alors le test est négatif. si la coloration votre tube devient rouge, alors le test est positif : VOUS NE DEVEZ PAS CONDUIRE.
<b>Classification</b>	Se reporter aux composants
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	999892
<b>Etanche</b>	Non