



[Fiche technique]

## **Solution neutralisante oculaire Plum produits acides - Flacon 200 ml**

Réf. 970473

**Neutralise rapidement les projections de produits chimique dans les yeux.**

**Très facile d'utilisation : œillère ergonomique qui maintient l'œil ouvert.**

**Le pH neutre apporte un premier soin en cas de projection de produits chimiques.**

- Solution pour rince oeil produit chimique à utiliser en cas de projection de produits chimiques dans les yeux.
- Le rinçage oculaire est à réaliser dans la minute qui suit l'accident oculaire.
- Le rince oeil Plum pH neutral possède le volume nécessaire pour un rinçage efficace.
- Il est péconisé d'effectuer le lavage avec la tête en arrière.
- Après utilisation du rince oeil pH neutral, il est recommandé ensuite de rincer l'oeil avec le [lave oeil Plum](#) pour corps étrangers.
- Cette solution PLUM ph neutral contient des sels de phosphate stérile (4,9%) qui neutralise rapidement les acides et bases forts.  
Ainsi, rend inoffensifs toute solution chimique et évite les brûlures oculaires. Contrairement à l'eau qui elle n'a que pour effet de dilution.
- Les sels de phosphate sont naturellement présents dans le corps humain.
- Comparé au pH Neutral, une quantité d'eau 50 fois plus élevée est nécessaire pour remettre le pH à un niveau sain.
- Lave oeil très pratique à utiliser :
  - Œillère ergonomique pour une application facilitée épousant parfaitement le contour de l'oeil.
  - Flacon rince oeil au petit format idéal pour les trousse de secours et les boîtes à outils.
  - Utilisation en usage unique. Également compatible en recharge pour station murale et coffret étanche.
- A placer dans les [armoires à pharmacie](#) et [trousse de secours](#) en fonction de la nature du travail (poste mobile ou fixe).
- Découvrez notre gamme complète de lave oeil.

## Informations complémentaires

Conseil : après un rinçage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage avec un lave-oeil PLUM jusqu'à intervention du médecin.

Temps de péremption : 3 ans.

Temps de lavage : env. 2 min.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Plum
<b>Caractéristiques produit</b>	Œillère ergonomique qui assure un flux de liquide efficace, fin et régulier Garantie totale de la stérilité de la solution car il faut tourner l'opercule à 360° pour ouvrir le flacon Durée de vie de 3 ans pour les flacons non ouverts
<b>Couleur</b>	transparent
<b>Utilisation</b>	Usage unique
<b>Volume</b>	200 ml
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	0.25 kg
<b>Livré avec</b>	une œillère ergonomique, un couvercle anti-poussière et une étiquette avec pictogramme d'instructions.
<b>Instructions d'utilisation</b>	Temps de rinçage préconisé : 2 minutes Après un rinçage avec pH Neutral il est conseillé de continuer le lavage avec un lave-oeil PLUM jusqu'à intervention du médecin
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1s
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	3307900000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	4752

## Photos

