



[Fiche technique]

Garrot tourniquet militaire SICH à velcro

Réf. 303336

GARROT TOURNIQUET SICH

Haute efficacité même dans les conditions les plus extrêmes.

Garrot tourniquet solide, léger et durable.

Arrêt des saignements très rapide.

- Le Garrot SICH-Tourniquet est une combinaison du garrot CAT et du garrot SOFTT-W.
- Il possède donc les caractéristiques de chacun des deux garrots de référence.
- Ultra efficace : arrêt rapide des saignements.
- Grâce aux composants en aluminium et à son velcro spécial breveté, ce garrot tourniquet possède une efficacité à l'épreuve de conditions météorologiques difficiles et de la saleté :
 - Salissure
 - Graisse ou huile
 - Garde son efficacité même en cas de température extrême (-40/+50)
- Très pratique, il peut se poser à une seule main sur soi-même ou sur un patient.
- Découvrez notre gamme complètes de [garrots tourniquets](#).

Informations complémentaires

Une étiquette sur la bande permet de noter l'heure de pose avec un crayon ou un objet pointu.

Testé dans les conditions extrêmes suivantes :

- à la température ambiante (24 ° C +/- 7 ° C), si le garrot est sec
- à la température ambiante (24 ° C +/- 7 ° C), si le garrot est humide
- à la température ambiante (24 ° C +/- 7 ° C), si le garrot est trempé dans du diesel
- si l'échantillon est congelé avant à -40 ° C
- si l'échantillon est chauffé à + 50 ° C.

Très compact replié pour être emporté facilement lors d'interventions.

Durée de vie 5 ans.

Fabriqué en Europe.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Déplié 5 x 80 cm. Plié 5 x 4.8 x 14 cm
Poids	105 g
Instructions d'utilisation	Placer le garrot environ 5 cm au-dessus de la blessure. Serrer la sangle du garrot autour du membre blessé en tirant sur l'extrémité libre afin de supprimer le mou. Serrer le plus fort possible. Fixer la sangle autour du membre avec du Velcro jusqu'au triangle du blocage (ne pas le recouvrir). Tourner la barre de pression jusqu'à arrêt de l'hémorragie. Aucun pouls distal ne devrait plus pouvoir être perçu. Bloquer l'extrémité de la barre de pression dans le triangle, si possible en verrouillant la tête de l'extrémité de la barre de pression dans le logement prévu à cet effet. Sécuriser l'ensemble en passant l'extrémité de la sangle dans l'un des deux interstices du triangle de blocage prévus à cet effet. Noter l'heure d'application du garrot avec un marqueur ou tout autre objet pointu sur l'emplacement prévu (surface gris argenté).
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Etanche	Non

Photos



garrot tourniquet militaire sich pour
hémorragie externe