



[Fiche technique]

Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform

Réf. 244015

**Kit complet d'attelles d'urgence pour pompiers pour une immobilisation optimale des membres.
Kit incluant 4 attelles : jambe adulte, jambe enfant, avant-bras, bras/coude et un sac de transport**

- Permet de respecter la morphologie et la déformation des membres grâce à son armature aluminium/polyéthylène modulable.
- Armature revêtue de mousse et d'une enveloppe lavable noire/blanche.
- Kit incluant 4 attelles : jambe adulte, jambe enfant, avant-bras, bras/coude et un sac de transport.

Kit Smurform composé d'une atelle modelable bras : comment l'installer ?

1. Plier l'attelle au niveau des échancrures et selon l'angulation du coude blessé. 2. Rabattre les côtés latéraux de l'attelle (bras & avant-bras). Modeler les armatures selon la déformation. 3. Positionner les petites sangles de fixation sur le bras & l'avant-bras (1 sur les bras & 2 sur l'avant-bras). 4. Positionner & croiser les grandes sangles de fixation au niveau du coude afin de bloquer l'angle.

Kit Smurform composé d'une atelle modelable main : comment l'installer ?

1. Modeler et mettre en forme l'attelle selon la déformation du membre.

2. Positionner le membre à l'intérieur de l'attelle avec le pouce en l'air. 3. Positionner les petites sangles de fixation sur le bras & le poignet.

4. Positionner & enrrouler la grande sangle de fixation au niveau de la main, la sangle devant passer de part et d'autre du pouce.

Kit Smurform composé d'une atelle modelable jambe enfant : comment l'installer ?

1. Positionner le membre à l'intérieur de l'attelle & modeler l'attelle selon la déformation du membre.

2. Rabattre les côtés latéraux.

3. Positionner une sangle de fermeture à l'extrémité de l'attelle, derrière le pied, afin de bloquer ce dernier.

4. Positionner les sangles de fermeture sur l'attelle : > deux sur le haut de la jambe (fémur) : une sur le haut de la cuisse & une au-dessus du genou. > deux sur le bas de la jambe (tibia) : une en-dessous du genou & une au-

dessus de la cheville.

Kit Smurform composé d'une attelle modelable jambe adulte : comment l'installer ?

1. Modeler l'attelle selon les déformations du membre.
2. Glisser l'attelle sous le membre.
3. Rabattre les côtés latéraux & la semelle du pied.
4. Positionner une sangle de fermeture à l'extrémité de l'attelle, derrière le pied, afin de bloquer ce dernier.
5. Positionner les sangles de fermeture sur l'attelle : > deux sur le haut de la jambe (fémur) : une sur le haut de la cuisse & une au-dessus du genou. > deux sur le bas de la jambe (tibia) : une en-dessous du genou & une au-dessus de la cheville. > une sur le milieu du pied, afin de bloquer la semelle à l'attelle.

Besoin d'une attelle à [dépression pompier](#) ? Commandez-le directement sur [smsp.fr](#).

Vous cherchez une [attelle pour le pied](#) ? Il vous attend sur [smsp.fr](#).

Informations complémentaires

Mise en place facile grâce à son système de fermeture par auto-agrippant.

Exclusivité Dumont Sécurité.

Caractéristiques techniques

Marque	Sober
Dimensions	Avant-bras 35 x 25 cm - Bras/Coude 65 x 25 cm - Jambe Enfant 78 x 32 cm - Jambe Adulte 100 x 36 à 42 cm
Caractéristiques produit	Mise en place facile grâce à son système de fermeture par auto-agrippant. Exclusivité Dumont Sécurité.
Composition de l'ensemble	Kit incluant 4 attelles : jambe adulte, jambe enfant, avant-bras, bras/coude et un sac de transport
Couleur	Noir/Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	Face blanche : maille jersey polyester enduit polyuréthane Face noire : maille grattée 100% polyamide Biais : polyester et coton Sangle : polypropylène, colle néoprène, aluminium Absence de latex Absence de phtalates Absence de nickel Absence de produit d'origine animale ou biologique
Poids	2.33 kg
Instructions d'utilisation	Positionner le membre à l'intérieur de l'attelle & modeler l'attelle selon la déformation du membre. Rabattre les côtés. Positionner les sangles de fermeture sur l'attelle. Mise en place du produit réalisée sous la responsabilité d'un professionnel de santé qualifié. L'attelle ne doit pas être en contact direct avec une plaie.
Entretien	Lavage à la main avec une eau savonneuse Faire sécher à l'ombre et à plat sur une surface plane Pas de repassage ni de vapeur Pas de nettoyage à sec
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9021109000
Référence fabricant (MPN)	KIT COMPLET ATTELLES
Quelle fonctionnalité recherchez vous?	Souple
Quel age a la victime que vous souhaitez transférer?	Adulte, Enfant
Quelle configuration du produit recherchez-vous?	En kit
Accessoires et Consommables	Réf. 244014 - Sac de transport pour attelles jambe et bras SMURFORM

Photos



Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform



Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform




Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform




Exemple de l'attelle modelable bras adulte Smurform contenu dans le kit



Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform

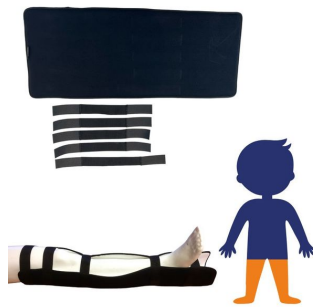

Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform

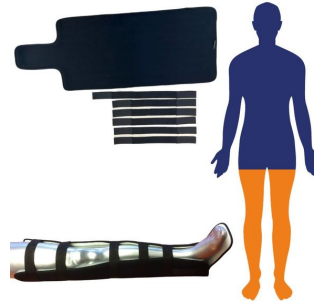


Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform

NETTOYAGE

- LAVAGE À LA MAIN AVEC UNE EAU SAVONNEUSE**
- PAS DE CHLORAGE**
- FAIRE SÉCHER À L'OMBRE ET À PLAT SUR UNE SURFACE PLANE**
- PAS DE REPASSAGE NI DE VAPEUR**
- PAS DE NETTOYAGE À SEC**

Instructions de nettoyage du kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform

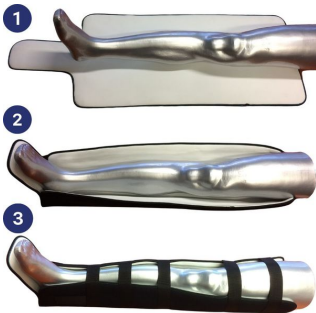

Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform



Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform



Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform



Kit de 4 attelles modelables jambe et bras Smurform