



[Fiche technique]

## Kit de suture stérile complet à usage unique

Réf. 970303

**AVIS**



### Description produit : Kit de suture stérile complet

Le kit de suture stérile à usage unique est conçu pour répondre aux besoins des interventions médicales en situations d'urgence ou dans un cadre hospitalier. Pratique et compact, il est idéal pour les unités mobiles, les postes de secours, ou comme complément d'équipement en milieu médical. Ce kit contient tout le nécessaire pour réaliser une suture rapidement et efficacement, avec des instruments stériles et prêts à l'emploi.

### Contenu du kit de suture :

- 1 champ absorbant adhésif (50x60 cm) avec ouverture circulaire de 6 cm, pour un travail précis et hygiénique.
- 1 pince métallique à griffes type Adson, pour manipuler les tissus avec précision.
- 5 compresses de gaze (7,5 x 7,5 cm, 30 gr), indispensables pour nettoyer et préparer la zone.
- 1 porte-aiguille métallique, conçu pour une manipulation aisée et sécurisée des aiguilles.
- 1 paire de ciseaux droits en plastique, pour découper fils ou pansements.

Le tout est conditionné dans un blister à compartiments stérile, garantissant une organisation optimale et un usage sécurisé.

### Réponses aux questions fréquentes :

#### 1. Combien de points de suture par cm ?

Le nombre de points de suture par centimètre dépend de la nature de la plaie et de sa localisation. En général :

- Pour une suture classique, on recommande 1 point tous les 0,5 à 1 cm. Cela permet une bonne approximation des bords de la plaie et une cicatrisation optimale.
- Sur le visage, où une cicatrisation fine est essentielle, on peut réduire l'espacement à 0,3 à 0,5 cm par point.

#### 2. Quand faire des points de suture ?

Les points de suture sont nécessaires lorsque :

- La plaie est profonde ou dépasse 5 mm de profondeur.
- Les bords de la plaie ne se rejoignent pas naturellement.
- La plaie saigne abondamment malgré une compression.

- Il y a un risque d'infection ou de cicatrice importante (plaie au visage, sur les mains ou articulations). Idéalement, les sutures doivent être réalisées dans les 6 à 8 heures suivant la blessure, voire 24 heures dans certaines situations.

### 3. Comment faire des points de suture ?

Voici les étapes générales pour réaliser une suture :

1. Préparer le matériel : Utiliser un kit stérile comme celui-ci. Se laver les mains et enfiler des gants stériles.
2. Nettoyer la plaie : Désinfecter soigneusement avec une solution antiseptique.
3. Anesthésier la zone (si possible) : Avec un anesthésique local pour limiter la douleur.
4. Réaliser la suture :
  - Attraper les bords de la plaie avec la pince.
  - Introduire l'aiguille à environ 0,5 cm du bord de la plaie, en traversant les deux côtés.
  - Faire un nœud pour sécuriser le fil après chaque point.
5. Finaliser : Nettoyer la zone, appliquer un pansement stérile et donner des instructions pour les soins.

### 4. Qui peut faire des points de suture ?

- Professionnels de santé qualifiés : Les médecins, infirmiers, et parfois les ambulanciers dans des contextes d'urgence.
- En cas de nécessité, certaines formations spécifiques permettent aux secouristes expérimentés ou au personnel médical en zones isolées de pratiquer des sutures.  
Attention : Dans tous les cas, il est recommandé que les points de suture soient réalisés par un professionnel pour éviter des complications (infection, mauvaise cicatrisation).

## Caractéristiques techniques

<b>Composition de l'ensemble</b>	Kit stérile à usage unique comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 blister dur 4 compartiments</li><li>- 1 porte aiguille métal</li><li>- 1 pince Micro Adson avec griffes en métal de 12 cm</li><li>- 1 paire de ciseaux bouts pointus de 11,5 cm</li><li>- 1 champ absorbant adhésif 50 x 60 cm troué Ø 8 cm</li><li>- 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm</li></ul>
<b>Couleur</b>	Gris, Noir, Blanc, Bleu Clair
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Sans latex sans PVC.
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Classification</b>	Dispositif médical de classe 2a
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	DK926
<b>Étanche</b>	Non

## Photos



kit de suture