



[Fiche technique]

## Pack Mannequin Heimlich Laerdal Chocking Charlie

Réf. 321061

**Pack: 1 torse adulte, 4 corps étrangers, 1 flacon de talc, 1 débardeur, 1 valise de transport. Outil de formation à la méthode Heimlich. Risque: obstruction des voies respiratoires par un corps étranger.**

Compositions du Choking Charlie (Laerdal)

- 1 torse adulte
- 4 corps étrangers
- 1 flacon de talc
- 1 débardeur
- 1 valise de transport

### Comparaison du mannequin Chocking Charlie avec la veste Act Fast :

Critères	Mannequin Heimlich Laerdal Choking Charlie	Veste d'apprentissage méthode Heimlich Act Fast
Réalisme de la simulation	Haute fidélité : simule une obstruction des voies respiratoires avec un retour direct sur l'effort de compression, idéal pour une formation réaliste.	Moins réaliste : simule seulement la compression abdominale sans simuler une obstruction réelle des voies respiratoires.
Portabilité	Moins portable : plus lourd et nécessite un espace plus vaste pour les exercices. Requiert un environnement plus adapté à son utilisation.	Très portable : léger et facile à transporter. Adaptée pour des formations en extérieur ou dans des espaces réduits.

Critères	Mannequin Heimlich Laerdal Choking Charlie	Veste d'apprentissage méthode Heimlich Act Fast
Coût	Plus coûteux : en raison de la technologie et des mécanismes internes pour simuler une obstruction, le prix est plus élevé.	Moins coûteuse : moins cher que le mannequin Choking Charlie, idéal pour des budgets limités

- Mannequin Chocking charlie spécialement conçu pour enseigner aux étudiants la méthode de Heimlich.
- Simulation d'un adulte en état de choc ne pouvant respirer ou parler en raison de l'obstruction des voies respiratoires par un corps étranger.
- Haute qualité de fabrication et remplacement très facile des pièces détachées permettant une utilisation du mannequin sur du long terme.
- Conseil d'utilisation : assurez-vous que le corps étranger soit bien placé au fond de la gorge du Chocking Charlie. L'air ne doit pas s'échapper. Le corps étranger sera ainsi plus facile à expulser lors de la mise en pratique de la manoeuvre de Heimlich.
- SMSP vous propose également :
  - Les produits d'hygiène et désinfection des mannequins comme les [lingettes désinfectantes](#).
  - Nos différents modèles de [mannequin Heimlich](#), avec notamment la [veste heimlich](#).
  - 
  - Les différents mannequins de secourisme Laerdal :  
Laerdal propose une gamme complète de mannequins de secourisme adaptés à différents niveaux d'apprentissage et d'expertise. On peut classer ces mannequins en trois grandes catégories : Little, Resusci, et QCPR.

Catégorie	Cible	Usage principal	Exemples de modèles
Little	Grand public, formations de base	Initiation à la RCP	Little Anne, Little Junior, Little Baby
Resusci	Professionnels, secouristes	Formation avancée et en équipe	Resusci Anne, Resusci Junior, Resusci Baby
QCPR	Tous niveaux	Évaluation et amélioration des performances	Little Anne QCPR, Resusci Anne QCPR, Resusci Baby QCPR

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Laerdal
<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 102 x 53 x 29 cm
<b>Couleur</b>	Chair Clair
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	14.79 kg
<b>Livré avec</b>	4 corps étrangers, 1 flacon de talc, 1 débardeur, 1 valise de transport
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Instructions d'utilisation</b>	Mettre un peu de talc sur le corps étranger avant de le mettre dans la bouche dumannequin. A l'aide de votre index, pousser le corps étranger en passant le premier point de résistance jusque dans la gorge. NE PAS CONSERVER LE CORPS ETRANGER A L'INTERIEUR DE LA BOUCHE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISE.
<b>Entretien</b>	Toujours travailler sur une surface propre. EVITER LES MARQUEURS, LES STYLOS ENCRE, L'ACETONE, L'IODINE OU AUTRES AGENTS TACHANT. NE PAS METTRE LE MANNEQUIN SUR DU PAPIER JOURNAL. Nettoyer avec du savon et de l'eau. NE PAS IMMERGER LE MANNEQUIN. Contrôler régulièrement le matériel. Le ranger correctement à la fin de chaque session de formation.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	102-00001
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



Pack Mannequin Heimlich  
Laerdal Chocking Charlie



Pack Mannequin Heimlich  
Laerdal Chocking Charlie



Pack Mannequin Heimlich  
Laerdal Chocking Charlie



Pack Mannequin Heimlich  
Laerdal Chocking Charlie