



[Fiche technique]

## Maquillage couleur chair foncée Plasto Nat Maqpro 200ml

Réf. 333350

### Maquillage couleur chair foncée Plasto Nat Maqpro 200ml

#### Matériel de formation secourisme SST, PSC, GQS, PSE2

- Le Plasto-nat se modèle avec les doigts, on peut ainsi lui donner toute sorte de forme.
  - Il suffit de le poser sur la peau, puis d'étaler les bords pour s'assurer d'une bonne adhérence.
  - Appliquer une fine couche de Sealor avec un pinceau : cela permettra de durcir le Plasto-Nat.
  - Une fois la forme de plaie réalisée, le Plasto-Nat est maquillé avec les différentes couleurs de fards crèmes.
  - Disponible en plusieurs conditionnements et en plusieurs coloris de peaux.
  - Découvrez notre large gamme de [maquillage formation secourisme](#).



Etaler une première couche de protection latex



Utiliser un fard jaune pour colorer le doigt



Modeler votre plasto-nat afin de former un cylindre de la taille de la phalange



Appliquer du fard bleu autour de la partie à couper. Ajouter du fard rouge. Placer le cylindre de plasto-nat sur votre phalange.



Etirer vers l'extérieur les extrémités du cylindre formé avec le Plasto-Nat



Ajouter du fard rouge à l'intérieur du cratère.



Ajouter du faux sang gélifié



Placer au fond du cratère une boule de Plasto-Nat afin de simuler l'os. Ajouter du sang gélifié.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Maqpro
<b>Caractéristiques produit</b>	Il faut nettoyer la surface de la peau pour obtenir une bonne adhérence du Plasto-nat.
<b>Couleur</b>	Marron Fonce
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Stéarate de zinc, huile de paraffine, cire microcristalline , stéarate de magnésium.
<b>Normes et Certification</b>	European Cosmetics Directive 1223/2009 CE
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	2027/B BLACK
<b>Etanche</b>	Non

## Photos



Maquillage couleur chair foncée  
Plasto Nat Maqpro 200ml



Emballage Maquillage couleur  
chair foncée Plasto Nat Maqpro  
200ml