



[Fiche technique]

## Zetuvit Pansement américain absorbant stérile

Réf. 304779 - 304780 - 304781 - 304784 - 304818

**Tailles: 15x20, 40x20, 20x25, 10x20**  
**Hydrocellulaire hyper absorbant**

[Pansement absorbant américain](#) non adhérent à la plaie recouvert d'un voile hydrophobe bleu : empêche les fuites et favorise les échanges gazeux.

Utilisé pour le recouvrement des plaies à forte sérosité et la réalisation de pansements alcoolisés.

Pansement américain des laboratoires Hartmann fabriqué sans latex : limite les risques d'allergie.

Taille des pansements américains, disponible en plusieurs dimensions et conditionnements.

15x20cm, boîte de 25

40x20cm, boîte de 5

20x25cm, boîte de 15

10x20cm, boîte de 25

Sachez que la gamme Hartmann Zetuvit inclut 2 formats, l'un stérile, l'autre non stérile. Les deux conservent leur propriété de pansement super absorbant.

A titre informatif, nous vous partageons une vidéo sur la gestion de l'exsudat:

[Comment cicatriser une plaie ouverte avec un pansement américain?](#)

La cicatrisation d'une plaie ouverte avec l'aide d'un pansement américain est un processus qui nécessite une gestion appropriée de la plaie pour favoriser la guérison. Voici les étapes générales pour cicatriser une plaie ouverte à l'aide d'un pansement américain :

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir des mains propres et portez des gants jetables si possible, surtout si vous êtes en train de soigner une plaie sur quelqu'un d'autre.
- Préparez tout le matériel nécessaire à portée de main.

2. Nettoyage de la plaie :

- Si la plaie n'a pas été nettoyée auparavant, nettoyez-la doucement avec de l'eau tiède et du savon ou une solution saline stérile. Utilisez une compresse stérile ou un coton-tige pour enlever délicatement les débris.
- Rincez abondamment la plaie pour éliminer tout résidu de savon ou de solution saline.

### 3. Séchage de la plaie :

- Utilisez une compresse stérile pour sécher délicatement la zone autour de la plaie. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de résidus d'eau.

### 4. Application du pansement américain :

- Déballez le pansement américain de son emballage stérile.
- Placez le côté non adhérent (souvent de couleur blanche ou beige) directement sur la plaie. Assurez-vous que le côté adhérent (s'il y en a un) soit orienté vers le haut ou à l'extérieur.
- Si le pansement est plus grand que la plaie, assurez-vous qu'il couvre complètement la zone affectée.

### 5. Fixation du pansement (le cas échéant) :

- Si nécessaire, fixez le pansement en place à l'aide de bandages ou de ruban médical adhésif. Veillez à ne pas trop serrer pour ne pas compromettre la circulation sanguine.

### 6. Surveillez la plaie :

- Surveillez régulièrement la plaie et le pansement pour détecter tout signe d'infection, d'irritation ou de dégradation du pansement.
- Changez le pansement conformément aux recommandations de votre professionnel de santé ou selon les indications figurant sur l'emballage du pansement. Le moment de changement peut varier en fonction de la gravité de la plaie.

### 7. Favorisez la guérison :

- Continuez à garder la plaie propre et protégée en remplaçant le pansement dès qu'il est nécessaire.
- Suivez les recommandations de votre professionnel de santé pour la gestion de la plaie, notamment en ce qui concerne les soins, les médicaments et les visites de suivi.

Il est important de noter que la cicatrisation peut prendre du temps, en fonction de la taille et de la gravité de la plaie. Si la plaie présente des signes d'infection, de dégradation ou si la douleur persiste, consultez immédiatement un professionnel de santé pour obtenir un avis médical approprié.

□

Composition : La partie centrale est constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée, recouvert à l'arrière d'un nontissé hydrophobe et perméable à l'air. Une voile de cellulose permettant la distribution des sécrétions entoure cette partie centrale. Le tout est enveloppé dans un nontissé non adhérent et hydrophile. Le dos est caractérisé par un fil de couleur bleue.

### Où acheter un pansement américain?

Sur SMSP, bien évidemment.

Pour acheter un pansement américain sur SMSP.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSP.fr : Allez sur [SMSP.fr](https://www.sm-sp.fr) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "pansement américain" ou "Zetuvit" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
3. Sélectionnez le produit : Une fois le pansement américain Zetuvit trouvé, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement.

## Informations complémentaires

Composition :

La partie centrale est constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée, entouré d'un voile de cellulose, hydrophile.

La face arrière est renforcée d'un non-tissé hydrophobe en polypropylène de couleur blanche.

L'ensemble est enveloppé d'un non-tissé externe en polypropylène blanc non adhérent.

Fermeture longitudinale et transversale par ultrasons. La face arrière est identifiée grâce à un ruban bleu intégré dans la soudure longitudinale.

Caractéristiques :

Capacité d'absorption maximale théorique (g/g de cellulose) : 8,5

Présence de latex : le produit ne contient pas de latex. L'emballage contient du latex au niveau des soudures uniquement.

Absence de : colophane, phtalates, produit d'origine animale ou biologique.

Absorption (EN 13726-1 chap 3.2) : min 50 g/ 100 cm<sup>2</sup> de surface absorbante.

Stérilisation :

A la vapeur d'eau.

Durée de vie : 5 ans après la stérilisation.

## Caractéristiques techniques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Marque</b>                   | Hartmann   |
| <b>Caractéristiques produit</b> | Capacité d'absorption maximale théorique (g/g de cellulose) : 8,5<br>Absence de : colophane, phtalates, produit d'origine animale ou biologique.<br>Absorption (EN 13726-1 chap 3.2) : min 50 g/ 100 cm <sup>2</sup> de surface absorbante.<br><br>Stérilisation :<br>A la vapeur d'eau.<br>Durée de vie : 5 ans après la stérilisation. |
| <b>Gamme</b>                    | Zetuvit  |
| <b>Stérile</b>                  | Stérile  |
| <b>Conforme 10g</b>             | Non  |
| <b>Matière</b>                  | Coussin en cellulose, face arrière en non-tissé en polypropylène   |
| <b>Classification</b>           | Dispositif médical de Classe 1s  |
| <b>Partie du corps</b>          |  |
| <b>Etanche</b>                  | Non  |

## Références


|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Réf. 304779</b> | Pansement américain absorbant Zetuvit E - 15x20 cm - boîte de 25<br>Unité de vente : Boîte de 25 |
| <b>Réf. 304818</b> | Pansement absorbant stérile Zetuvit E - 40 x 20 cm<br>Unité de vente : Boîte de 5                |
| <b>Réf. 304781</b> | Pansement américain absorbant Zetuvit E - 20x25 cm - boîte de 15<br>Unité de vente : Boîte de 15 |
| <b>Réf. 304784</b> | Pansement américain absorbant Zetuvit E - 10x20 cm - boîte de 25<br>Unité de vente : Boîte de 25 |

## Photos



pansement absorbant stérile  
zetuvite hartmann

Ref. 304818

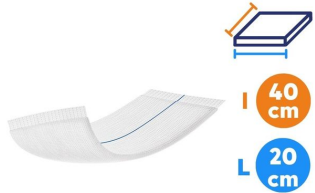

**STERILE**  
**PANSEMENTS X5**

Zetuvit Pansement américain  
absorbant stérile



pansement absorbant stérile

Ref. 304781



**STERILE**  
**PANSEMENTS X15**


Zetuvit Pansement américain  
absorbant stérile



**4 CHOIX**

Zetuvit Pansement américain  
absorbant stérile

Ref. 304781

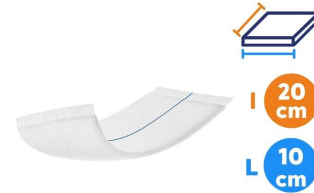

**STERILE**  
**PANSEMENTS X25**

Zetuvit Pansement américain  
absorbant stérile



Ref. 304779

**STERILE**  
**PANSEMENTS X25**

Zetuvit Pansement américain  
absorbant stérile