



[Fiche technique]

Pansement israélien compressif stérile First Care

Réf. 304250 - 304258

Ce pansement israélien permet de stopper simplement et efficacement une hémorragie externe. Conçu pour pouvoir réaliser les soins sur soi-même à une seule main et sans assistance.

Pansement Israélien Compressif Stérile First Care Blanc - L'Essentiel en Cas d'Hémorragie Massive

Le Pansement Israélien Compressif Stérile First Care Blanc est un dispositif de secours incontournable pour maîtriser les hémorragies massives et traiter les blessures graves en situation d'urgence. Conçu pour un usage rapide et efficace, il est idéal pour les secouristes, les services d'urgence, les sapeurs-pompiers, et les personnels de santé en milieu hospitalier. Ce pansement compressif de type israélien est stérilisé par rayonnements gamma, à usage unique, et offre une durabilité exceptionnelle de 8 ans.

Caractéristiques et Avantages du pansement israélien:

- **Système de compression avancé** : Grâce à un applicateur de pression intégré, ce pansement permet de comprimer efficacement la plaie, réalisant une hémostase rapide et fiable.
- **Utilisation à une main** : Parfait pour les soins en autonomie, ce pansement peut être appliqué avec une seule main, facilitant l'intervention même en l'absence de soutien.
- **Garrot intégré** : En cas de besoin, ce pansement compressif peut être utilisé comme garrot temporaire pour stopper une hémorragie sévère.
- **Compresse non adhérente** : Évite que la compresse colle à la plaie, minimisant ainsi les douleurs lors du retrait.
- **Pratique et multi-usage** : Outre le traitement des blessures, il peut être utilisé pour des morsures de serpent ou des plaies profondes, offrant une solution flexible et polyvalente pour diverses urgences.

Pourquoi choisir le Pansement Israélien Compressif First Care Blanc ?

Ce pansement compressif est un choix de premier ordre pour les situations d'urgence nécessitant une intervention rapide et efficace. Grâce à sa capacité à générer une forte pression sur la plaie, il permet un arrêt rapide de l'hémorragie, tout en restant facile à manipuler même en condition de stress ou en cas de soin sur soi-même.

Comment utiliser un Pansement Israélien Compressif ?

1. Commencer par une compression manuelle : Avant de placer le pansement, appliquez une pression manuelle sur la plaie.
2. Positionner la compresse sur la blessure : Placez la compresse non adhérente sur la plaie et commencez à enrouler la bande autour du membre blessé.

3. Insérer dans l'applicateur de pression : Passez le bandage dans l'applicateur de pression pour obtenir une compression optimale.
4. Continuer l'enroulement : Serrez bien la bande et continuez à l'enrouler autour de la blessure de part et d'autre de l'applicateur.
5. Assurer une fixation solide : Verrouillez le bandage à l'aide des crochets intégrés pour garantir une pression continue sur la compresse.

Sécurité et Durabilité du pansement compressif:

- Conditionnement stérile : Chaque pansement est scellé individuellement, garantissant une hygiène optimale.
- Longue durée de conservation : Avec une durée de vie de 8 ans, il constitue un investissement durable dans tout kit de premiers secours.
- Conçu pour les situations critiques : Le pansement israélien est particulièrement apprécié pour sa capacité à stopper les hémorragies en quelques gestes simples, même en situation extrême.

Pour qui est destiné le Pansement Israélien Compressif First Care Blanc ?

Ce pansement est destiné à tous les professionnels des premiers secours, aux équipes médicales, mais aussi aux particuliers souhaitant compléter une trousse de secours efficace pour la maison, la voiture, ou les activités de plein air. Son utilisation polyvalente et sa facilité d'application en font un atout précieux pour ceux qui peuvent se trouver en situation d'urgence.

Ayez l'Essentiel sous la Main avec le Pansement Israélien First Care Blanc

Offrez-vous la tranquillité d'esprit en intégrant ce [Pansement Israélien Compressif Stérile](#) dans votre équipement de secours.

Vous avez besoin d'une [attelle d'immobilisation cheville](#) ? Nous avons ce qu'il vous faut sur smsp.fr.

Informations complémentaires

Stérilisation par rayonnements gamma.

Durée de vie 8 ans.

Températures de stockage : -10°C à 60°C

Températures d'utilisation : -10°C à 60°C

Caractéristiques techniques

Dimensions	Compresse (Lxl) 10 x 18 cm. Bande (Lxl) 4.4 m x 10 cm (longueur étirée). Longueur de la bande non étirée 180 cm
Caractéristiques produit	Stérilisation par rayonnements gamma. Durée de vie 8 ans. Températures de stockage : -10°C à 60°C Températures d'utilisation : -10°C à 60°C
Couleur	Blanc
Utilisation	Usage unique
Stérile	Stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Sans latex
Unité de vente	Emballage sous vide.
Poids	66 g
Normes et Certification	N° OTAN (NATO NSN no.) : 6510-01-460-0849 ISO 13485
Instructions d'utilisation	Placer les compresses sur les blessures et dérouler le bandage autour de la partie blessée. Insérer la bande élastique dans l'applicateur de pression. Serrer puis continuer à dérouler la bande élastique en sens inverse de façon à ce que l'applicateur de pression appuie sur la compresse. Une fois la bande déroulée, fixer le tout en insérant l'extrémité de retenue entre les couches de pansement.
Classification	Dispositif médical de Classe 1s
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	Réf. 270200 - Kit Hémorragie Externe 25 pièces pour zone non garrotable Réf. 304259 - Pansement compressif israélien stérile First Care Blanc - Lot de 10

Références

Réf. 304250	Pansement compressif israélien stérile First Care - Blanc
Réf. 304258	Pansement israélien compressif stérile First Care - Version militaire

Photos



Pansement israelien compressif stérile First Care Blanc



pansement compressif version militaire stérile pour hémorragie externe certifié iso13485 disponibles en 2 modèles




Pansement israélien compressif stérile First Care Blanc



Pansement israélien compressif stérile First Care Blanc



conditionnement du pansement israelien compressif stérile

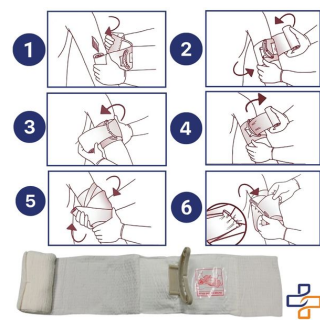

comment poser une pansement compressif israelien ?



Pansement israélien compressif stérile First Care Blanc