



[Fiche technique]

## **Station rince oeil murale avec couvercle transparent**

Réf. 970490

**Permet de neutraliser le liquide étranger et limiter toute complication ou lésion à l'œil. Elle trouvera facilement sa place sur le lieu de travail. Contient 2 flacons de solution stérile de 500 ml chacun.**

- Lave oeil stocké à l'abri dans la station DROP thermoformé avec un couvercle protecteur transparent.
- Station rince oeil permettant de neutraliser le liquide étranger et limiter toute complication ou lésion à l'œil.
- Le coffret se fixe aisément au mur par des vis et des chevilles (fournies avec le kit). Elle trouvera facilement sa place sur le lieu de travail.
- 2 flacons de solution stérile de 500 ml chacun.

### Applications

Parfait pour les lieux de travail à risque (ateliers, laboratoires, industries, etc.) nécessitant une solution de rinçage oculaire rapide et fiable.

### Mode d'emploi

1. Tirez légèrement sur le couvercle transparent pour le laisser tomber vers le bas.
  2. Retirez un flacon et tournez le bouchon de l'œillère. Le sceau de sécurité se brise automatiquement.
  3. Appliquez l'œillère anatomique sur l'œil à traiter. Le jet de solution est dirigé de manière optimale pour un lavage efficace et sans gaspillage.
- Découvrez notre gamme complète de [lave oeil](#).

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxp) : 41 x 32 x 7,5 cm
<b>Couleur</b>	Vert Clair, Vert Foncé
<b>Stérile</b>	Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	1,5 kg
<b>Livré avec</b>	2 flacons de solution saline stérile de 500 ml, 2 bouchons lave-oeil ergonomiques et 1 miroir
<b>Instructions d'utilisation</b>	Tirez légèrement sur le couvercle transparent et laissez-le tomber vers le bas. Sortez une des bouteilles, tournez le bouchon de l'œillère, le sceau de sécurité se brise et vous pouvez utiliser la solution. L'œillère anatomique permet de diriger correctement le jet de solution, obtenant ainsi un lavage des yeux efficace et sans gaspillage.
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	30065000

## Photos



Station rince oeil murale avec couvercle transparent



Station rince oeil murale avec couvercle transparent



Station rince oeil murale avec couvercle transparent