



[Fiche technique]

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen

Réf. 970900

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen

Dispositif à utiliser en cas de projection de corps étrangers dans les yeux.

Il présente un côté avec une pointe métallique aimantée : permet de retirer sans risque des éclardes métalliques et des limailles de fer de l'oeil.

Et un côté avec une pointe métallique avec boucle en nylon : pour retirer des éclardes non métalliques et des poussières.

Rangement pratique et hygiénique : les 2 embouts, qui s'emboîtent dans le stylo oculaire, sont parfaitement protégés.

Découvrez notre gamme complète de [rinçage oeil](#).


Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 12 x 1 x 1 cm
Couleur	Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	plastique rondelles en néoprène boucle en nylon
Unité de vente	A l'unité
Poids	15 g
Instructions d'utilisation	-Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde. -Effectuer l'extraction et rincer abondement avec de l'eau. -Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante. -Eviter tout contact des rondelles en néoprène avec la solution désinfectante.
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	9018501000
Référence fabricant (MPN)	640

Photos




Aimanté pour pouvoir enlever les limailles

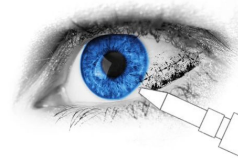

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen globe de l'oeil

Boucle en nylon pour enlever les poussières

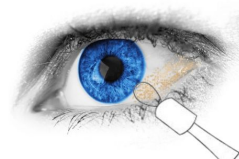

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen globe de l'oeil