



[Fiche technique]

## **Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen**

Réf. 970900

### **Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen**

Dispositif à utiliser en cas de projection de corps étrangers dans les yeux.

Il présente un côté avec une pointe métallique aimantée : permet de retirer sans risque des éclardes métalliques et des limailles de fer de l'oeil.

Et un côté avec une pointe métallique avec boucle en nylon : pour retirer des éclardes non métalliques et des poussières.

Rangement pratique et hygiénique : les 2 embouts, qui s'emboîtent dans le stylo oculaire, sont parfaitement protégés.

Découvrez notre gamme complète de [rinçage oeil](#).


## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 12 x 1 x 1 cm
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	plastique rondelles en néoprène boucle en nylon
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	15 g
<b>Instructions d'utilisation</b>	-Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde. -Effectuer l'extraction et rincer abondement avec de l'eau. -Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante. -Eviter tout contact des rondelles en néoprène avec la solution désinfectante.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	9018501000
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	640

## Photos




Aimanté pour pouvoir enlever les limailles

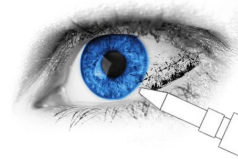

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen globe de l'oeil

Boucle en nylon pour enlever les poussières

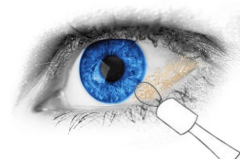

Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen globe de l'oeil