



[Fiche technique]

Surfanios Premium - Dose de 20 ml - Lot de 1000

Réf. 120079

Nettoyage et désinfection des sols, murs et dispositifs médicaux non-invasifs

Très efficace, puissant et sans rinçage

Bactéricide, Virucide et Fongicide

Si vous souhaitez plus d'informations sur le [surfanios Premium](#), veuillez consulter la ref.120050.

- Désinfectant ANIOS à diluer bactéricide, virucide et fongicide.
- Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.
- Haute détergence de couleur verte.
- Surfanios dilution conseillée à 0.25%.
- Une fois diluée, la solution peut être conservé jusqu'à 7 jours dans un contenant fermé et 24 heures dans un contenant ouvert.
- Respectez les précautions d'emploi. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Surfanios : respecte les exigences de la réglementation européenne relative aux produits biocides destinés à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (Groupe 1- TP 2 & 4). Bénéficie du marquage CE en tant que Dispositif Médical de classe IIa, en conformité avec la Directive 93/42/CE.

Mode d'emploi du désinfectant surfanios Premium

- Remplir un seau avec 8 litres d'eau.
- Verser une dose de 20 ml de surfanios Premium dans le seau (dilution à 0,25%).
- Après avoir fait un balayage humide de la pièce, réaliser le lavage en respectant bien le schéma de nettoyage à savoir du fond vers la sortie.
- Le rinçage n'est pas nécessaire sauf si les zones traitées sont destinées à être en contact avec la peau, les denrées alimentaires et les muqueuses.
- Remplacer les franges autant de fois que nécessaire en mettant la frange sale dans un récipient prévu pour cet effet.
- Après le nettoyage de chaque secteur, remplacer la frange et renouveler l'opération en ajoutant la solution de lavage aux doses indiquées.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Marque | Anios |
| Conforme 10g | Non |
| Unité de vente | Lot de 1000 |
| Classification | Se reporter aux composants |
| Partie du corps | |
| Référence fabricant (MPN) | 120079 |
| Etanche | Non |