


## SOCLE MURAL

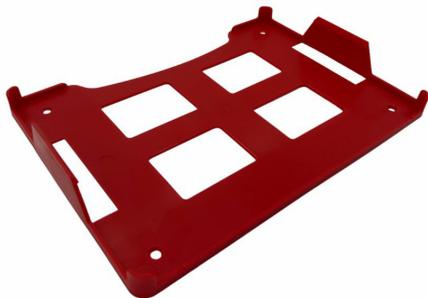

[Fiche technique]

### **Station de lavage oculaire avec support mural - Déstockage 1 pce restante**

Réf. 970970

#### **Kit oculaire avec 1 flacon lavage, 10 compresses, 1 loupe, 1 stylo, 1 pince à écharde**

#### **Déstockage : 1 pièce restante avant arrêt commercialisation**

- Permet d'extraire ou neutraliser tout corps étrangers dans l'oeil.
- Trousse premiers secours idéale pour avoir accès à tout son matériel et intervenir rapidement.
- Enlever ou neutraliser tout corps étranger rapidement avec un lave oeil permet de réduire considérablement les risques d'aggravation et de lésions.
- Très pratique et polyvalent, le stylo oculaire est doté d'une pointe aimantée pour retirer les corps étrangers métalliques (écharde métalliques) et une pointe avec une boucle en nylon permettant de retirer tout corps étranger non métalliques (écharde non métalliques, des poussières).
- Trousse de secours avec support mural.
- Découvrez notre large [gamme de lave oeil](#).
- Composition de l'ensemble:

1 flacon lavage oculaire 200 ml

10 compresses stériles 20 x 20 cm

1 loupe oculaire

1 stylo oculaire

1 pince à écharde

1 scellé

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) Trousse 26 x 18 x 4.5 cm
<b>Composition de l'ensemble</b>	1 flacon lavage oculaire 200 ml 10 compresses stériles 20 x 20 cm 1 loupe oculaire 1 stylo oculaire 1 pince à écharde 1 scellé
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Trousse en polypropylène
<b>Instructions d'utilisation</b>	Utilisation du stylo oculaire : -Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde. -Effectuer l'extraction et rincer abondement les yeux avec de l'eau ou la solution de lavage oculaire fournie. -Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante. -Eviter tout contact des rondelles en néoprène avec la solution désinfectante.
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 1s
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 970900 - Stylo oculaire 2 en 1 pour extraction corps étranger cornéen

## Photos



Trousse de secours avec rince œil

### LAVE OEIL



200mL

Trousse de secours avec rince œil

### STYLO OCULAIRE



Trousse de secours avec rince œil

### COMPRESSES STÉRILE



x10

20 x 20 cm


Trousse de secours avec rince œil

### SCELLÉ



Trousse de secours avec rince œil

### SOCLE MURAL

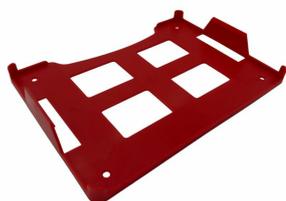

Trousse de secours avec rince œil