



[Fiche technique]

## Veste d'apprentissage méthode Heimlich

Réf. 311311 - 311313

**Conçu pour s'entraîner aux gestes de secourisme contre l'étouffement (désobstruction des voies aériennes). Idéale pour les formations SST.**

La veste d'apprentissage Heimlich est un outil essentiel pour les formations aux gestes de premiers secours, notamment pour maîtriser la méthode Heimlich, une technique clé pour la désobstruction des voies aériennes. Conçue pour simuler des situations d'étouffement, cette veste permet aux apprenants de s'exercer efficacement dans des conditions proches de la réalité.

### Caractéristiques Techniques de la veste Heimlich:

- Simulateur Polyvalent : Permet de s'entraîner à :
  - Pratiquer les compressions abdominales : Une expulsion réaliste du corps étranger se produit lorsque le geste est correctement exécuté.
  - Maîtriser le bon positionnement des tapes entre les omoplates, avec un repère abdominal pour guider l'apprenant.
- Coussin de Claquement : Intégré dans le dos, il reproduit les sensations d'un geste efficace lors des tapes dorsales, renforçant la formation pratique.
- Taille Ajustable : Grâce à des sangles latérales réglables, la veste s'adapte à toutes les corpulences, assurant un confort optimal pour le porteur.
- Matériaux Légers et Ergonomiques : Offrent une grande légèreté et un confort maximal pendant la formation.
- Faible Encombrement : Facile à stocker et transporter.
- Deux Tailles Disponibles :
  - Adulte : Adaptée aux apprenants de grande taille.
  - Enfant : Idéal pour enseigner la technique chez les plus jeunes (dès 1 an ou 5 kg).

### Avantages de la Formation avec la Veste Heimlich :

- Approche Réaliste : Reproduit fidèlement les conditions d'intervention d'urgence, permettant une immersion totale pour un apprentissage efficace.
- Entraînement Sécurisé : Permet de pratiquer sans risque, en simulant l'expulsion du corps étranger.
- Formation Complète : Inclut les deux étapes de la méthode Heimlich : les compressions abdominales et les claques dans le dos.

### Utilisation de la veste :

- Formations de Secours : Outil pédagogique pour les instructeurs en secourisme, adapté aux formations professionnelles ou grand public.
- Entraînement aux Gestes d'Urgence : Pour les particuliers, entreprises, ou organisations souhaitant enseigner ou apprendre les techniques de désobstruction.

### À propos de la Méthode Heimlich :

La [méthode Heimlich](#) est une procédure de premiers secours indispensable pour faire face à une obstruction grave des voies respiratoires, comme lors de l'ingestion d'un corps étranger (nourriture, jouet). Elle combine compressions abdominales et tapes dorsales pour expulser efficacement l'objet obstruant les voies respiratoires.

### Complétez votre Formation pse :

Associez cette veste avec le mannequin Heimlich Choking pour une expérience interactive et réaliste. Ensemble, ces outils pédagogiques permettent de former efficacement les sauveteurs à agir avec rapidité et précision en cas d'étouffement.

Investissez dans la veste d'apprentissage Heimlich, un équipement clé pour enseigner et pratiquer une technique qui peut sauver des vies.

## Informations complémentaires

Les + produit :

- Confortable et légère.
- Crédibilité des gestes.
- Sangles réglables adaptables à toutes les morphologies.
- Moins encombrante qu'un mannequin.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Act Fast
<b>Composition de l'ensemble</b>	1 veste Actfast 1 ballon PVC 1 ensemble de voies aériennes 10 bouchons en mousse 1 sac de rangement, 1 manuel d'utilisation
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Stérile</b>	Non Stérile
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Veste en néoprène Ballon et tube en PVC Coussinet et bouchons en mousse
<b>Livré avec</b>	
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Instructions d'utilisation</b>	A utiliser sous la direction des instructeurs de secourisme La veste peut être utilisée en position debout ou couchée : utiliser le coussinet arrière pour s'entraîner aux coups dans le dos (ne pas utiliser avec force) ; compresser le creux de l'estomac, juste en dessous du sternum pour s'entraîner aux compressions abdominales afin de déloger le bouchon en mousse par éjection
<b>Entretien</b>	Sur l'envers de la veste, défaire les bandes velcro, enlever le ballon et le tube ; laver la veste en utilisant un détergeant doux, laisser sécher à l'air libre
<b>Partie du corps</b>	
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 311312 - Corps étrangers pour veste Heimlich - Lot de 10

## Références

**Réf. 311311** Veste Heimlich - Taille adulte

**Réf. 311313** Veste Heimlich - Taille enfant

## Photos



veste Heimlich



veste Heimlich



méthode Heimlich



méthode Heimlich



veste Heimlich